

Fácil
aplicação no
sulco

VOCO Retraction Paste

VOCO Retraction Paste

PASTA DE RETRAÇÃO PARA AFASTAMENTO
TEMPORÁRIO E SECAGEM DO SULCO GENGIVAL

A Simplicidade em uma Cápsula

PASTA DE RETRAÇÃO PARA AFASTAMENTO TEMPORÁRIO E SECAGEM DO SULCO GENGIVAL

Moldagens perfeitas, controle da umidade e uma intervenção atraumática dos tecidos moles são fatores imprescindíveis para a obtenção de margens de coroas precisas e perfeitamente adaptadas, bem como de restaurações duradouras e estéticas.

Indispensável em qualquer consultório!

A **VOCO Retraction Paste** é um auxiliar indispensável para o eficaz afastamento temporário e secagem do sulco gengival. Só assim é possível obter uma boa moldagem, quer por procedimento convencional ou digital.

Ao ser extraída da cápsula *SingleDose* (desenvolvida pelos engenheiros da VOCO), a pasta pode ser aplicada diretamente no sulco gengival. A quantidade é suficiente para até 3 sulcos. Graças ao plástico mole e flexível da cápsula, a aplicação é mais delicada para os tecidos, sendo por isso mais confortável para os pacientes do que a utilização de cânulas de metal ou a colocação de fios de retração. A viscosidade da pasta foi desenvolvida especificamente para os requisitos clínicos do procedimento. De acordo com a pressão aplicada, a viscosidade da pasta se altera gradualmente (*Viscosity Change*). A pasta é fácil de extrair, flui bem sobre os tecidos e pode ser aplicada de modo muito preciso, empregando pouca pressão. No sulco gengival, tem consistência firme, o que proporciona um afastamento temporário do sulco.

A ação adstringente do cloreto de alumínio contido na pasta estanca possíveis sangramentos e controla a umidade. Já depois de um curto período de ação, de 1 a 2 minutos, a **VOCO Retraction Paste** pode ser facilmente removida. A pasta pode ser utilizada em alternativa ao fio de retração ou combinada com o fio. Fica então ao seu critério optar pela moldagem tradicional com um material de moldagem, ou digital, com recurso de um scanner intraoral.

Indicações

Para o deslocamento temporário da gengiva marginal e secagem do sulco gengival com o periodonto saudável, por exemplo, antes de

- Moldagens analógicas ou digitais
- Cimentação de restaurações temporárias e definitivas
- Restaurações das classes II e V

Vantagens

- **Ponta fina e flexível** – aplicação fácil e precisa no sulco
- **Viscosity Change** – a consistência da pasta muda durante a aplicação, mediante mais ou menos pressão exercida
- **Boa visibilidade** – contraste com a gengiva
- **Procedimento limpo** – limpeza fácil e rápida

Apresentações

REF 1012 Caps 25 x 0,3 g

REF 1013 Caps 100 x 0,3 g



VOCO do Brasil Ltda
 Av. Severo Dullius, 195/101A
 Porto Alegre - RS
 CEP: 90200-310
 Tel.: (51) 3337-5153
 Fax: (51) 3337-8486
 info@voco.com.br
 www.voco.dental

VOCO GmbH
 Anton-Flettner-Straße 1-3
 27474 Cuxhaven
 Germany
 Tel.: +49 (0) 4721-719-0
 Fax: +49 (0) 4721-719-140
 info@voco.com
 www.voco.dental

Contato para pedidos: