

脱敏剂  
(双氟12)  
使用说明书

**产品名称及描述:**

本脱敏剂 (**Bifluorid 12**) 是由牙科用合成树脂制成的含氟洞漆。

**产品适用范围:**

该产品用于治疗牙颈部和人造冠边缘的牙本质过敏; 氟化牙釉质; 牙体预备后的抗过敏处理。

**产品性能结构及组成:**

本品为人造树脂含氟洞漆, 只限于牙齿表面使用。主要成份: 6.0%氟化钠、6.0%氟化钙、乙酸乙酯、低氮消化纤维素、二氧化硅、丁香油。

**产品作用:**

脱敏剂 (**Bifluorid 12**) 是一款快速干燥的保护漆, 可粘在干燥的牙釉质和牙本质上, 可以渗入感染面深层 (尤其是易发生龋齿的部位), 实现长效的氟化作用。该产品在涂布的部位, 会形成一层防水的薄膜, 避免其受到热刺激和化学刺激。每次使用该产品时, 应尽可能长时间地将含氟保护漆保留在治疗表面上, 使氟化物可以发挥作用。

**型号规格:**

单支装: 10 g 瓶装;

套装: 4 g 瓶装, 10 ml 溶剂;

大包装: 3 x 10 g 瓶装/盒, 10 ml 溶剂及 **Pele Tim**;

单剂片装: 50 支装, **MircoTim**, 刷架; 200 支装, **MircoTim**, 刷架。

**使用目的:**

治疗超敏牙颈和牙冠边缘。

研磨一个或多个牙齿后的牙釉质氟化和牙齿脱敏。

在填充完成后 (尤其是在使用了酸蚀剂的情况下), 以及嵌入牙冠、嵌体和桥后, 使用该产品在窝洞边缘, 以预防继发龋。

**使用方法:**

清洁需要治疗的区域, 并使用无油气枪彻底干燥。

该产品在每次使用前必须充分摇匀。固体颗粒必须均匀分布。包装瓶内多余的空间和两个金属小球有助于摇匀该产品。

该产品可以滴在刷子上, 如可滴在 **Pele Tim** 海绵球上则效果更佳。应在牙齿表面涂敷薄层。

请注意: 过厚的涂层容易脱落!

如有必要, 可以稀释保护漆。

**使用单剂片装脱敏剂时:**

沿接缝孔折叠, 取出单剂量脱敏剂, 使印刷面向上。使用 **MircoTim** 刺穿箔纸, 扩大开口, 画圈式旋转扩大开口, 并充分润湿小刷。等待 10 - 20 秒, 让牙齿吸收含氟保护漆, 然后用无油气枪进行干燥。

如涂敷正确且口腔卫生情况良好 (涂敷后 12 - 24 小时内不要刷牙), 则保护漆可以保留数天时间。在这段时间里, 氟保护漆在治疗表面发挥作用。

对于超敏牙颈、牙冠边缘或类似适应症, 应以 7 天的间隔治疗 2 次或 3 次。

治疗表面需再次干燥和涂敷。

该产品必须具有充足的流动性, 在摇匀后可从滴管中滴出。可能需要使用几滴产品配套的溶剂。该溶剂也可用于清洁器械等。

**储存:**


脱敏剂 (**Bifluorid 12**) 应在 4 °C - 23 °C 的地方贮存, 避免高温、潮湿以及阳光直射, 避开火源。

**生产日期和失效日期:**

见外包装标签。

**补充说明:**

使用脱敏剂 (**Bifluorid 12**) 的重要说明:

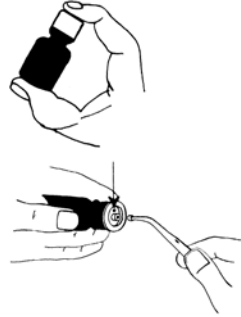

1. 清洁需要治疗的牙面 (清除菌斑) 并彻底干燥。
2. 用拇指和食指拿住瓶子摇动。当小球从沉淀物中分离出来后, 应使用较小的力摇动。
3. 使用 **Pele Tim** 海绵球 1 号尺寸或 **Single Tim** 涂敷该产品, 效果最佳。用镊子将 **Pele Tim** 放入瓶子开口中, 然后缓慢倾放瓶子, 再将镊子缓慢撤回瓶口, 使涂漆浸透 **Pele Tim**。
4. 涂敷薄层的该产品, 让牙齿吸收 10 - 20 秒, 然后如有必要, 用无油气枪吹干。
5. 该产品必须始终为液态。如果变稠, 通过瓶口的空气孔, 将 3 - 5 滴溶剂滴入瓶中, 然后紧闭瓶子并充分摇匀。
6. 如有需要, 治疗超敏牙齿时, 以一周一次的频率, 重复患者治疗 2 - 3 次。

我们的产品专为牙科医学所开发。对于我们的产品的相关说明, 我们依据我们的知识为您提供最为详尽的口头与书面说明并且不承担相关责任。尽管我们可提供信息和/或建议, 您仍需仔细检查产品并确保其正确使用。由于我们无法监控用户的使用, 因此用户将对其使用的后果负全责。当然我们保证我们的产品符合现行产品质量标准并且其销售和运输均符合相关规定。

**注册人/生产企业**

名称: 德国沃柯有限公司 VOCO GmbH

住所: Anton-Flettner-Str. 1-3, 27472 Cuxhaven, Germany

生产地址: Anton-Flettner-Str. 1-3, 27472 Cuxhaven, Germany

原产地: 德国

**代理人/售后服务单位**

名称: 沃柯牙科产品 (上海) 有限公司

住所: 上海市普陀区长寿路 1118 号 B 幢 9 层 K

电话: 021-52378798

传真: 021-52388766

电子信箱: china@voco.com

网址: www.voco.cn

医疗器械注册证/产品技术要求编号: 国械注进 20182172613

修订日期: 2023 年 1 月 09 日

通信地址:  
Anton-Flettner-Str. 1-3  
27472 Cuxhaven  
Germany/德国

电话: +49 (4721) 719-0  
传真: +49 (4721) 719-140  
电子信箱: china@voco.com  
网址: www.voco.cn