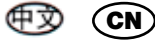


VOCO**Provicol®/Provicol® C/****Provicol® QM**

氢氧化钙临时冠桥粘接剂

使用说明书

符合EN 23107/ISO 3107

产品名称及描述:

Provicol/Provicol C/Provicol QM是一款方便使用，不会影响以树脂为基质的充填或者粘固材料。特别适合对丁香酚过敏的患者。

Provicol/Provicol C/Provicol QM 含有氢氧化钙成分，可以帮助保持牙齿活力。

产品规格型号:**Provicol**

编号No.:1075, 基质25g, 催化剂25g

编号No.:1078, 大包装5x2管, 催化剂和基质

Provicol C

编号No.:1076, 注射管装2x65g, 6型混合头

Provicol QM

编号No.:1074, 快速混合注射器装5ml, 10型混合头

产品结构及组成:

该产品不含丁香油，含有氢氧化钙的临时冠桥粘接剂。

产品适用范围:

可用作修复体的临时性粘接剂，并可封闭小的单表面窝沟。

使用方法:**Provicol**

在通常的室温(18°C - 23°C)的条件下使用。如果室温较低或者使用冷冻过的玻璃调板，材料的工作时间会相应延长。

将**Provicol**的基质与催化剂按照1:1w/w的比例调和。操作时，将两管中的材料分别挤出等量的长度置于较硬、不吸水的调拌板上或玻璃板上。

混合挤出的两个糊剂，调拌大约20秒钟直到材料达到了均匀的粘稠度。用塑料调拌刀或者不锈钢调拌刀进行调拌。

加入少量的凡士林，可以使材料软化，延长工作时间。而加入氧化锌可加快材料的固化。

Provicol QM (快速混合注射器装)

由于技术的原因，材料在第一次使用之前可能会在两个注射管之间有细微的差别。因此拿掉注射器的盖子，挤出一些材料直到两个注射管的材料均匀一致为止。

先取下注射器的盖子，对准契角插上10号混合头，并按顺时针旋转90度，锁定。材料在挤出时会自动混合，可以直接使用于临时冠桥粘接。所有的快速混合注射器装都带有一个可拆卸的盖子。盖子较易取下，更换时也不会使材料漏出。保持注射器的塞子位置不动可避免材料交叉污染。

Provicol C (注射管装)

由于技术的原因，材料在第一次使用之前可能会在两个注射管之间有细微的差别。因此拿掉注射器的盖子，挤出一些材料直到两个注射管的材料均匀一致为止。使用2型混合枪和6型混合头。其他同上。

运用:将细薄的一层**Provicol/Provicol C/Provicol QM**置于做好的临时冠桥内和已备好的牙体桩上，不要将备好的牙体桩吹干，最好还可以适当的润湿。

Provicol可以操作的时间是1.5-2分钟。**Provicol C/ Provicol QM**大约只有1分钟。材料在口内的完成时间为4 - 6分钟。在置于口内后的3 - 5分钟内可以去除溢出的多余部分材料。

注意事项和预防措施:

如果牙髓腔已经打开或者牙本质的厚度太薄，那么推荐使用相应的牙髓保护措施。**Provicol/Provicol C/Provicol QM**含有氧化锌、氧化镁、氢氧化钙、脂肪酸、植物油，对此类物质有过敏症状的患者，应谨慎使用。

备好的牙桩核部分的过敏症状可以通过使用脱敏涂漆来降低，只要在使用临时粘接剂之前涂抹就可以了。在使用最终的永久粘接剂前（粘结最终牙冠），清除掉这些材料即可。（千万不要使用含有丁香酚的材料!）

如果针对更深层次的、多面的窝洞，以及长期的临时封闭需要，建议使用更坚硬的水门汀材料（如：后牙充填用的玻璃离子体水门汀）。

禁忌症:

对所含任何一种化学成分过敏者请勿使用本品。

补充使用技巧:

为了使混合出来的材料材质更加柔软，或者使氢氧化钙临时冠桥粘接剂的工作时间更长，可在操作中将牙体润湿（潮湿的牙桩核），可以使之后临时冠取出的时候更加方便。

Provicol/Provicol C/Provicol QM溢出牙冠的多余部分，可用冷冻剂，吹很短时间后更容易去除。

储存:

在4°C - 23°C的温度下储存。使用后请将冠盖盖紧。请勿使用过期产品。

我们产品专为牙科医学所开发。对于我们的产品的相关说明，我们依据我们的知识为您提供最为详尽的口头及书面说明并且不承担相关责任。尽管我们可提供信息和/或建议，您仍需仔细检查产品并确保其正确使用。由于我们无法监控用户的使用，因此用户将对其使用的后果负全责。当然我们保证我们的产品符合现行产品质量标准并且其销售和运输均符合相关规定。

生产日期和失效日期：见外包装标签。

注册人/生产企业

名称：德国沃柯有限公司 VOCO GmbH

住所：Anton-Flettner-Str.1-3, 27472 Cuxhaven, Germany

生产地址：Anton-Flettner-Str.1-3, 27472 Cuxhaven, Germany

原产地：德国

代理人/售后服务

名称：沃柯牙科产品（上海）有限公司

住所：上海市普陀区长寿路1118号B幢9层K

电话：021-52378798

传真：021-52388766

电子信箱：china@voco.com

网址：www.voco.cn

医疗器械注册证/产品技术要求编号：国械注进20182172079

修订日期：2023年3月9日

通信地址：

Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany/德国

电话：+49 (4721) 719-0

传真：+49 (4721) 719-140

电子信箱：china@voco.com

网址：www.voco.cn

VOCO