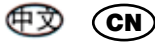


**VOCO****Vococid®**

酸蚀剂

(商品名: **Vococid**)

使用说明书

**产品名称及描述:****Vococid**是一种应用于牙釉质酸蚀或全酸蚀技术的酸蚀剂。**型号规格:**

包装规格: 2 ml/支, 3 ml/支, 5 ml/支, 配套用输送头

**产品结构及组成:**

该产品主要组成成分为磷酸、水、甘油和二氧化硅。

**产品适用范围:**

该产品适用于非全酸蚀技术中酸蚀牙釉质, 及在全酸蚀技术中酸蚀牙釉质和牙本质。

**具体用途:**

该产品适用于非全酸蚀技术中酸蚀牙釉质及在全酸蚀技术中酸蚀牙釉质和牙本质。具体可在下列修复过程中使用:

- 树脂材料的充填修复
- 马里兰桥、嵌体、托槽和临时性的夹板的粘结固定
- 龋齿的封闭
- 使用垫底材料时, 对粘结面的处理(参考其它材料生产厂家的使用说明)

**使用方法:**

该酸蚀剂使用起来十分简单, 同时由于材料的粘稠度合适, 以及呈现蓝色使得它在牙釉质面上容易识别, 操作更加容易。使用该酸蚀剂可以实现最精确的操作(如: 酸蚀牙釉质的边缘部位)。该材料最好配合**Pele Tim**海绵球或者毛刷使用。

**非全酸蚀技术(只酸蚀牙釉质):**

将一到两滴酸蚀剂滴于**Pele Tim**海绵球上, 直接涂抹于牙釉质面上, 直到牙釉质面完全的湿润。如果必要, 材料可适当加大剂量。

使用该酸蚀剂时, 应该尽量遵照推荐的时间以保证其发挥作用的效果。

**操作时间指导如下:**

对于一般的牙釉质和青少年的牙釉质, 需酸蚀20秒;

对于死髓牙, 严重氟化的牙釉质或者还没有生长成型的牙齿(例如乳牙)酸蚀时间约为30秒。

使用完材料后, 用水彻底的冲洗, 针对每个被酸蚀过的牙齿至少冲洗15 - 30秒。此操作之后患者暂时不应闭嘴, 再用气枪彻底吹干酸蚀过的牙面。

操作过程中, 牙面应完全与唾液隔离, 如果一旦被唾液污染, 应再次重复酸蚀的操作(10秒), 仔细检查酸蚀过的牙面(应呈现出白垩色)。

**配合牙本质/牙釉质粘结剂的全酸蚀技术(即同时酸蚀牙本质和牙釉质):**

酸蚀整个窝洞(牙釉质约为20 - 30秒, 牙本质最长15秒)。用吸管去除酸蚀剂, 冲洗, 并且用气枪去除剩余的水分。

如果是其它厂家的同类产品, 请严格按照厂家的使用说明操作。

**注意事项/预防措施:**

- 如果一旦材料接触到眼睛, 用大量的清水彻底的冲洗。
- 请避免材料接触牙龈, 部分树脂充填材料以及邻牙。
- 如果不采用全酸蚀技术, 如果必要可以在酸蚀前将牙本质面隔离开。我们推荐您针对邻牙面、以及被酸蚀过但没有被树脂材料等覆盖的牙釉质面, 进行一次到两次的氟化治疗, 以加强牙釉质面的再矿化。

**储存:**

储存温度在4 °C - 23 °C之间, 使用完后请密封严密。

只有完全使用完的材料包装可以进行回收处理。残留的酸蚀剂可以用水进行稀释或者用废水进行中和即可。

过期后请不要再使用该产品。

**生产日期和失效日期:**

见外包装

**使用期限: 2.5 年**

我们的产品专为牙科医学所开发。对于我们的产品的相关说明, 我们依据我们的知识为您提供最为详尽的口头与书面说明并且不承担相关责任。尽管我们可提供信息和/或建议, 您仍需仔细检查产品并确保其正确使用。由于我们无法监控用户的使用, 因此用户将对其使用的后果负全责。当然我们保证我们的产品符合现行产品质量标准并且其销售和运输均符合相关规定。

**注册人/生产企业**

名称: 德国沃柯有限公司 VOCO GmbH

住所: Anton-Flettner-Str.1-3, 27472 Cuxhaven, Germany

生产地址: Anton-Flettner-Str.1-3, 27472 Cuxhaven, Germany

原产地: 德国

**代理人/售后服务**

名称: 德国沃柯有限公司上海代表处

住所: 上海市普陀区长寿路1118号16J室

电话: 021-52378798

传真: 021-52388766

电子信箱: china@voco.com

网址: www.voco.cn

医疗器械注册证/技术要求编号: 国械注进20152170230

修订日期: 2018年06月24日

通信地址:

Anton-Flettner-Str. 1-3  
27472 Cuxhaven  
Germany/德国

电话: +49 (4721) 719-0

传真: +49 (4721) 719-140

电子信箱: china@voco.com

网址: www.voco.cn

**VOCO**