



V-Print splint comfort (V-02)

Indikationen / Indications

Therapeutische Schienen / Therapeutic splints

Hilfs- und Funktionsteile die Diagnose betreffend / Auxiliary parts and functional parts for diagnostics

Bleaching-Schienen (Home-Bleaching) / Bleaching splints (home bleaching)

Gaumenplatten / Palatal plates

Druckerhersteller / manufacturer	3D-Druck / 3D printing		Reinigung / Washing		Nachbelichtung / Postcuring		
	Gerät / Device	Schicht / Layer* [µm]	Build Style*	Gerät / Device	Programm / Program	Gerät / Device	Programm / Program
VOCO ¹	SolFlex 170 [SMP] SolFlex 350 [SMP] SolFlex 650 [SMP] SolFlex 170 HD	100	Normal SE	Ultraschall / Ultra sonic	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
				RS Wash	V-Print splint comfort	RS Cure / RS Cure US	V-Print splint comfort
				Rührbad / stirring bath	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
W2P ¹	SolFlex 170 [Plus] SolFlex 350 [Plus] SolFlex 650 [Plus] SolFlex 163 FullHD SolFlex 250 UHD	100	Normal SE	Ultraschall / Ultra sonic	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
				RS Wash	V-Print splint comfort	RS Cure / RS Cure US	V-Print splint comfort
				Rührbad / stirring bath	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
ASIGA	MAX UV MAX 2 PRO 4K ULTRA	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
				RS Wash	V-Print splint comfort	RS Cure / RS Cure US	V-Print splint comfort
				Rührbad / stirring bath	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
Rapid Shape	D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+ PRO 20	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
				RS Wash	V-Print splint comfort	RS Cure / RS Cure US	V-Print splint comfort
				Rührbad / stirring bath	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
DMG	3Delite 3Demax	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
				DMG 3Dewash	V-Print splint comfort	3Decure	V-Print splint comfort
				Rührbad / stirring bath	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
Shera	SHERAprint 20 SHERAprint 30 SHERAprint 40 SHERAprint 20+ SHERAprint 30+ SHERAprint 50+	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
				SHERAprint-wash	V-Print splint comfort	SHERAprint-cure	V-Print splint comfort
				Rührbad / stirring bath	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
Straumann	P20 II P30 II P40 II P10+ P20+ P30+ P50+	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
				P wash	V-Print splint comfort	P cure / P cure US	V-Print splint comfort
				Rührbad / stirring bath	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
Dentalwings	D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
				D wash	V-Print splint comfort	D cure	V-Print splint comfort
				Rührbad / stirring bath	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
Microloy	Versus	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
				Rührbad / stirring bath	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
MiiCraft	Prime 150Y Ultra 125Y / 150Y Hyper 125Y Profession 250Y ALPHA	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	5 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
				Rührbad / stirring bath	5 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²

x = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

¹ nur mit PowerVat / only with PowerVat ² Schutzgas empfohlen / N₂ recommended

Weitere Drucker und Nachbearbeitungsgeräte (für z.B. Ackuretta, Shining 3D, DENTAL MAKERS oder Uniz Technology) erhalten Sie auf Anfrage per Mail über unseren VOCO Digital-Support: digitalsupport@voco.com / Further printers and post-processing devices (e.g. for Ackuretta, Shining 3D, DENTAL MAKERS or Uniz Technology) are available on request by e-mail from our VOCO Digital Support: digitalsupport@voco.com



V-Print splint comfort (V-02)

Indikationen / Indications

Therapeutische Schienen / Therapeutic splints

Hilfs- und Funktionsteile die Diagnose betreffend / Auxiliary parts and functional parts for diagnostics

Bleaching-Schienen (Home-Bleaching) / Bleaching splints (home bleaching)

Gaumenplatten / Palatal plates

 VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.dental

VOCO

THE DENTALISTS