



V-Print model fast

Indikationen / Indications
Dentale Modelle / Dental models

Druckerhersteller / manufacturer	3D-Druck / 3D printing			Reinigung / Washing		Nachbelichtung / Postcuring	
	Gerät / Device	Schicht / Layer* [µm]	Build Style*	Gerät / Device	Programm / Program	Gerät / Device	Programm / Program
VOCO	SolFlex 170 [SMP] SolFlex 350 [SMP] SolFlex 650 [SMP] SolFlex 170 HD	100	Normal SE	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 x 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 x 30 min
						Hilite power 3D	2 x 5 min
				RS Wash	V-Print model fast	RS Cure / RS Cure US	V-Print model fast
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 x 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 x 30 min
W2P	SolFlex 170 [Plus] SolFlex 350 [Plus] SolFlex 650 [Plus] SolFlex 163 FullHD	100	Normal SE	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	Hilite power 3D	2 x 5 min
						OtoFlash G171	2 x 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 x 30 min.
						Hilite power 3D	2 x 5 min
				RS Wash	V-Print model fast	RS Cure / RS Cure US	V-Print model fast
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 x 2000 flashes
ASIGA	MAX UV PRO 4K	150	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	Next Dent LC Box	1 x 30 min.
						Imprimo Cure	1 x 10 min.
				RS Wash	V-Print model fast	RS Cure / RS Cure US	V-Print model fast
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 x 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 x 30 min.
						Imprimo Cure	1 x 10 min.
Rapid Shape	D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 x 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 x 30 min.
				RS Wash	V-Print model fast	RS Cure / RS Cure US	V-Print model fast
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 x 2000 flashes
DMG	3Delite 3Demax	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	Next Dent LC Box	1 x 30 min.
						3Decure	V-Print model fast
				DMG 3Dewash	V-Print model fast	OtoFlash G171	2 x 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	Next Dent LC Box	1 x 30 min.
Shera	SHERAprint 20 SHERAprint 30 SHERAprint 40 SHERAprint 20+ SHERAprint 30+ SHERAprint 50+	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 x 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 x 30 min.
				SHERAprint-wash	V-Print model fast	SHERAprint-cure	V-Print model fast
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 x 2000 flashes
Straumann	P20 II P30 II P40 II P10+ P20+ P30+ P50+	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	Next Dent LC Box	1 x 30 min.
						P cure / P cure US	V-Print model fast
				P wash	V-Print model fast	OtoFlash G171	2 x 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	Next Dent LC Box	1 x 30 min.
Ackuretta	FreeShape 120	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 x 2000 flashes
						OtoFlash G171	2 x 2000 flashes
				CLEANI (Finishing Kit)	5 min. / 5 min.	OtoFlash G171	2 x 2000 flashes
				Cleaner MEDIFIVE (Model: Twin Tornado)	5 min. / 5 min.	OtoFlash G171	2 x 2000 flashes
		Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 x 2000 flashes		

x = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

3D-Druck / 3D printing				Reinigung / Washing		Nachbelichtung / Postcuring	
Druckerhersteller / manufacturer	Gerät / Device	Schicht / Layer* [µm]	Build Style*	Gerät / Device	Programm / Program	Gerät / Device	Programm / Program
Ackuretta	SOL	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 x 2000 flashes
						Ackuretta Curie	2 x 5 min. (P = 16 / D = 10 / B = on)
						Next Dent LC Box	1 x 30 min.
				CLEANI (Finishing Kit)	5 min. / 5 min.	OtoFlash G171	2 x 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 x 30 min.
						Ackuretta Curie	2 x 5 min. (P = 16 / D = 10 / B = on)
				Cleaner MEDIFIVE (Model: Twin Tornado)	5 min. / 5 min.	OtoFlash G171	2 x 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 x 30 min.
						Ackuretta Curie	2 x 5 min. (P = 16 / D = 10 / B = on)
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 x 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 x 30 min.
						Ackuretta Curie	2 x 5 min. (P = 16 / D = 10 / B = on)
Dentalwings	D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 x 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 x 30 min.
				D wash	V-Print model fast	D cure	V-Print model fast
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 x 2000 flashes
Microlay	Versus EVE Pro	150	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 x 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 x 30 min.
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 x 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 x 30 min.
MiiCraft	Prime 150Y Ultra 125Y / 150Y Hyper 125Y Profession 250Y	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 x 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 x 30 min.
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 x 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 x 30 min.

x = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.dental

VOCO

THE DENTALISTS