



V-Print tray

Indikationen / Indications

Individuelle Abform- und Funktionslöffel / Individual impression and function trays¹
 Basen für Bisschablonen und Wachsaufstellungen in der Totalprothetik / Bases for bite templates and wax assemblies for full dentures²
 Bissregistratur / Occlusal registrations²

Druckerhersteller / manufacturer	3D-Druck / 3D printing		Reinigung / Washing		Nachbelichtung / Postcuring		
	Gerät / Device	Schicht / Layer* [µm]	Build Style*	Gerät / Device	Programm / Program	Gerät / Device	Programm / Program
VOCO	SolFlex 170 [SMP] SolFlex 350 [SMP] SolFlex 650 [SMP] SolFlex 170 HD	100 ² / 200 ¹	Normal SE	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 × 30 min.
				RS Wash	V-Print tray	Hilite power 3D	2 × 5 min.
						RS Cure / RS Cure US	V-Print tray
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 × 30 min.
Hilite power 3D	2 × 5 min.						
W2P	SolFlex 170 [Plus] SolFlex 350 [Plus] SolFlex 650 [Plus] SolFlex 163 FullHD SolFlex 250 UHD	100 ² / 200 ¹	Normal SE	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 × 30 min.
				RS Wash	V-Print tray	Hilite power 3D	2 × 5 min.
						RS Cure / RS Cure US	V-Print tray
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 × 30 min.
Hilite power 3D	2 × 5 min.						
ASIGA	MAX UV PRO 4K	100 ² / 200 ¹	×	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 × 30 min.
				RS Wash	V-Print tray	Imprimo Cure	1 × 15 min.
						RS Cure / RS Cure US	V-Print tray
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 × 30 min.
Imprimo Cure	1 × 15 min.						
Rapid Shape	D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+	100	×	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 × 30 min.
				RS Wash	V-Print tray	RS Cure / RS Cure US	V-Print tray
						OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	Next Dent LC Box	1 × 30 min.
						Imprimo Cure	1 × 15 min.
DMG	3Delite 3Demax	100	×	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 × 30 min.
				DMG 3Dewash	V-Print tray	3Decure	V-Print tray
						OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	Next Dent LC Box	1 × 30 min.
						Imprimo Cure	1 × 15 min.
Shera	SHERAprint 20 SHERAprint 30 SHERAprint 40 SHERAprint 20+ SHERAprint 30+ SHERAprint 50+	100	×	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 × 30 min.
				SHERAprint-wash	V-Print tray	SHERAprint-cure	V-Print tray
						OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	Next Dent LC Box	1 × 30 min.
						Imprimo Cure	1 × 15 min.
Straumann	P20 II P30 II P40 II P10+ P20+ P30+ P50+	100	×	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 × 30 min.
				P wash	V-Print tray	P cure / P cure US	V-Print tray
						OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	Next Dent LC Box	1 × 30 min.
						Imprimo Cure	1 × 15 min.
Dentalwings	D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+	100	×	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 × 30 min.
				D wash	V-Print tray	D cure	V-Print tray
						OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	Next Dent LC Box	1 × 30 min.
						Imprimo Cure	1 × 15 min.

× = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

3D-Druck / 3D printing				Reinigung / Washing		Nachbelichtung / Postcuring	
Druckerhersteller / manufacturer	Gerät / Device	Schicht / Layer* [µm]	Build Style*	Gerät / Device	Programm / Program	Gerät / Device	Programm / Program
Microloy	Versus EVE Pro	100 ² / 150 ¹	×	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	Next Dent LC Box	1 × 30 min.
Ackuretta	SOL	Standard ^{1,2}	×	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 × 30 min.
						Ackuretta Curie	1 × 5 min. (P = 13 / D = 8 / B = on)
						Ackuretta Curie Plus	V-Print tray
				CLEANI (Finishing Kit)	3 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 × 30 min.
						Ackuretta Curie	1 × 5 min. (P = 13 / D = 8 / B = on)
						Ackuretta Curie Plus	V-Print tray
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 × 30 min.
						Ackuretta Curie	1 × 5 min. (P = 13 / D = 8 / B = on)
						Ackuretta Curie Plus	V-Print tray
MiiCraft	Prime 150Y Ultra 125Y / 150Y Hyper 125Y Profession 250Y	150	×	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	Next Dent LC Box	1 × 30 min.
UNIZ Technology	NBEE	100	×	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
UnionTech	E128 E230	100	×	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
DENTAL MAKERS	LightBuilder 4K	100	×	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes

× = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.dental

VOCO

THE DENTALISTS