



V-Print Try-In

Indikationen / Indications

Einprobekörper für die Total- und Teilprothetik / Try-ins for full and partial dentures
 Transfer- und Einschleifschablonen / Transfer and grinding templates
 Korrekturabformung und Bissnahme / Correction and occlusal impressions

Druckerhersteller / manufacturer	3D-Druck / 3D printing		Reinigung / Washing		Nachbelichtung / Postcuring		
	Gerät / Device	Schicht / Layer* [µm]	Build Style*	Gerät / Device	Programm / Program	Gerät / Device	Programm / Program
VOCO	SolFlex 170 [SMP] SolFlex 350 [SMP] SolFlex 650 [SMP] SolFlex 170 HD	100	Normal SE	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 × 30 min.
				RS Wash	V-Print Try-In	Hilite power 3D	2 × 5 min.
						RS Cure / RS Cure US	V-Print Try-In
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 × 30 min.
Hilite power 3D	2 × 5 min.						
W2P	SolFlex 170 [Plus] SolFlex 350 [Plus] SolFlex 650 [Plus] SolFlex 163 FullHD SolFlex 250 UHD	100	Normal SE	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 × 30 min.
				RS Wash	V-Print Try-In	Hilite power 3D	2 × 5 min.
						RS Cure / RS Cure US	V-Print Try-In
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 × 30 min.
Hilite power 3D	2 × 5 min.						
ASIGA	MAX UV PRO 4K	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 × 30 min.
				RS Wash	V-Print Try-In	Imprimo Cure	1 × 10 min.
						RS Cure / RS Cure US	V-Print Try-In
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 × 30 min.
Imprimo Cure	1 × 10 min.						
Rapid Shape	D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 × 30 min.
				RS Wash	V-Print Try-In	RS Cure / RS Cure US	V-Print Try-In
						OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	Next Dent LC Box	1 × 30 min.
						Imprimo Cure	1 × 10 min.
DMG	3Delite 3Demax	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 × 30 min.
				DMG 3Dewash	V-Print Try-In	3Decure	V-Print Try-In
						OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	Next Dent LC Box	1 × 30 min.
						OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
Next Dent LC Box	1 × 30 min.						
Shera	SHERAprint 20 SHERAprint 30 SHERAprint 40 SHERAprint 20+ SHERAprint 30+ SHERAprint 50+	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 × 30 min.
				SHERAprint-wash	V-Print Try-In	SHERAprint-cure	V-Print Try-In
						OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	Next Dent LC Box	1 × 30 min.
						OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
Next Dent LC Box	1 × 30 min.						
Straumann	P20 II P30 II P40 II P10+ P20+ P30+ P50+	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 × 30 min.
				P wash	V-Print Try-In	P cure / P cure US	V-Print Try-In
						OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	Next Dent LC Box	1 × 30 min.
						OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
Next Dent LC Box	1 × 30 min.						
Dentalwings	D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 × 30 min.
				D wash	V-Print Try-In	D cure	V-Print Try-In
						OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	Next Dent LC Box	1 × 30 min.
						OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
Next Dent LC Box	1 × 30 min.						

x = Nicht anwendbar / not applicable

*empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

3D-Druck / 3D printing				Reinigung / Washing		Nachbelichtung / Postcuring	
Druckerhersteller / manufacturer	Gerät / Device	Schicht / Layer* [µm]	Build Style*	Gerät / Device	Programm / Program	Gerät / Device	Programm / Program
Microloy	Versus EVE Pro	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	Next Dent LC Box	1 x 30 min.
Ackuretta	SOL	Standard	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 x 30 min.
						Ackuretta Curie	1 x 5 min. (P = 13 / D = 8 / B = on)
						Ackuretta Curie Plus	V-Print Try-In
				CLEANI (Finishing Kit)	3 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 x 30 min.
						Ackuretta Curie	1 x 5 min. (P = 13 / D = 8 / B = on)
						Ackuretta Curie Plus	V-Print Try-In
Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes				
		Next Dent LC Box	1 x 30 min.				
		Ackuretta Curie	1 x 5 min. (P = 13 / D = 8 / B = on)				
		Ackuretta Curie Plus	V-Print Try-In				
MiiCraft	Prime 150Y Ultra 125Y / 150Y Hyper 125Y Profession 250Y	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	Next Dent LC Box	1 x 30 min.
UNIZ Technology	NBEE	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes
UnionTech	E128 E230	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes
DENTAL MAKERS	LightBuilder 4K	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes

x = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.dental

VOCO

THE DENTALISTS