



# V-Print model 2.0

## Indikationen / Indications

Dentale Arbeits- und Präsentationsmodelle / Dental working and presentation models

3D-Druck / 3D printing				Reinigung / Washing		Nachbelichtung / Postcuring	
Druckerhersteller / manufacturer	Gerät / Device	Schicht / Layer* [µm]	Build Style*	Gerät / Device	Programm / Program	Gerät / Device	Programm / Program
VOCO <sup>1</sup>	SolFlex 170 [SMP] SolFlex 350 [SMP] SolFlex 650 [SMP] SolFlex 170 HD	100	Normal SE	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
				RS Wash	V-Print model 2.0	RS Cure / RS Cure US	V-Print model 2.0
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
W2P <sup>1</sup>	SolFlex 170 [Plus] SolFlex 350 [Plus] SolFlex 650 [Plus] SolFlex 163 FullHD SolFlex 250 UHD	100	Normal SE	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
				RS Wash	V-Print model 2.0	RS Cure / RS Cure US	V-Print model 2.0
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
ASIGA	MAX UV PRO 4K	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
						Imprimo Cure	1 × 20 min.
				RS Wash	V-Print model 2.0	RS Cure / RS Cure US	V-Print model 2.0
						Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.
Imprimo Cure	1 × 20 min.						
Rapid Shape	D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
				RS Wash	V-Print model 2.0	RS Cure / RS Cure US	V-Print model 2.0
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
DMG	3Delite 3Demax	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
				DMG 3Dewash	V-Print model 2.0	3Decure	V-Print model 2.0
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
Shera	SHERAprint 20 SHERAprint 30 SHERAprint 40 SHERAprint 20+ SHERAprint 30+ SHERAprint 50+	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
				SHERAprint-wash	V-Print model 2.0	SHERAprint-cure	V-Print model 2.0
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
Straumann	P20 II P30 II P40 II P10+ P20+ P30+ P50+	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
				P wash	V-Print model 2.0	P cure / P cure US	V-Print model 2.0
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
Dentalwings	D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
				D wash	V-Print model 2.0	D cure	V-Print model 2.0
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
Microloy	Versus EVE Pro	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
MiiCraft	Prime 150Y Ultra 125Y / 150Y Hyper 125Y Profession 250Y	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes

x = Nicht anwendbar / not applicable \*empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

<sup>1</sup> Nur mit PowerVat / only with PowerVat

3D-Druck / 3D printing				Reinigung / Washing		Nachbelichtung / Postcuring	
Druckerhersteller / manufacturer	Gerät / Device	Schicht / Layer* [µm]	Build Style*	Gerät / Device	Programm / Program	Gerät / Device	Programm / Program
Ackuretta	SOL	Standard	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes
						Ackuretta Curie	1 x 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on)
						Ackuretta Curie Plus	V-Print model 2.0
				CLEANI (Finishing Kit)	3 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes
						Ackuretta Curie	1 x 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on)
						Ackuretta Curie Plus	V-Print model 2.0
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes
						Ackuretta Curie	1 x 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on)
						Ackuretta Curie Plus	V-Print model 2.0
Ackuretta	SOLPlus	Standard	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes
						Ackuretta Curie	1 x 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on)
						Ackuretta Curie Plus	V-Print model 2.0
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes
						Ackuretta Curie	1 x 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on)
						Ackuretta Curie Plus	V-Print model 2.0
Shining 3D	AccuFab-L4D	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes
						FabCure 2	1 x 15 min. (without heating)
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes
						FabCure 2	1 x 15 min. (without heating)
UnionTech	EvoDent S300 E128 E230	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes
UNIZ Technology	NBEE	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes
DENTAL MAKERS	LightBuilder 4K	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes

x = Nicht anwendbar / not applicable \*empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

VOCO GmbH  
Anton-Flettner-Str. 1-3  
27472 Cuxhaven  
Germany

Phone +49 (4721) 719-0  
Fax +49 (4721) 719-140  
e-mail: [marketing@voco.com](mailto:marketing@voco.com)  
[www.voco.dental](http://www.voco.dental)

**VOCO**

THE DENTALISTS