


VOCO Profluorid Varnish

Hassasiyet giderici, flor içerikli lak  0482

Kullanım talimatı

VOCO Profluorid Varnish, mine ve dentin yüzeylerine uygulanan flor içerikli bir hassasiyet gidericidir.

VOCO Profluorid Varnish nemli yüzeylere tutunabilen, artık nemi ve tükürüğü tolere edebilen bir lakdır.

VOCO Profluorid Varnish yapay aromaya sahip kolophonium ile tatlı etkiye sahip xylitol den oluşan etanol esaslı bir süspansiyondur.

1 ml **VOCO Profluorid Varnish** 22,6 mg flora tekabül eden 50 mg sodyumflorid içermektedir.

Endikasyonları:

VOCO Profluorid Varnish' in kullanım alanları aşağıdaki gibidir.

1. Hassas dişlerin tedavisi
2. Kavite preparasyonları veya hassas kanal yüzeylerinin dentin kanallarının izole edilmesinde

Uygulama:

Tavsiye edilen dozaj

- **Süt dişlerine uygulamada**
yaklaşık 0,25 ml **VOCO Profluorid Varnish**
- **Daimi dişlerde uygulama**
yaklaşık 0,40 ml **VOCO Profluorid Varnish**

VOCO Profluorid Varnish'i ince bir tabaka olarak diş yüzeyine uygulayınız. Kalın uygulanan tabakaların tutuculuğu daha azdır ve tedavi başarısını etkilememektedir.

Tüm dişlere uygulandığı durumlarda 0,25 ml ila 0,40 ml' lik dozajlar yeterli olmaktadır.

Kullanım:

1. Uygulamanın yapılacağı diş yüzeylerindeki olası diş taşlarını uzaklaştırınız.
2. Daha başarılı sonuçlar elde edebilmek için uygulanacak diş yüzeylerini tükürük ve nemden izole ediniz.
3. **VOCO Profluorid Varnish**' i uygulama fırçası veya pelet yardımı ile ince bir film tabakası olmak üzere yüzeylere uygulayınız.
4. Uygulama alanlarını **VOCO Profluorid Varnish**' in tutunmasını sağlamak için nemlendiriniz (hafif yıkama veya tükürük ile).
5. Tedavi sonrası hastanın 4 saat gıda ve alkol almaması gerekmektedir. Dişlerin bu süre içinde fırçalanmaması ve diş ipinin de kullanılmasına dikkat ediniz.

Dikkat edilmesi gerekenler:

Kullanımına uygun olarak **VOCO Profluorid Varnish** yapışkan bir yapıya sahiptir. Kapakçık yuvasında biriken materyal artıkları istenmeyen sıkışmalara neden olabilmektedir. Böyle durumlarda karşılaşıldığında artıkların etanol içeren bir bez ile uzaklaştırılması gerekmektedir.

VOCO Profluorid Varnish ülseratif gingivitis veya stomatitis vakalarında kullanılmamalıdır. Ayrıca ürün içeriğindeki herhangi bir maddeye ve kolophonium' a karşı alerjisi olan hastalara da uygulanmamalıdır. **VOCO Profluorid Varnish** sistematik tedaviler için endike değildir.

Nadir vakalarda (geniş alana uygulamaları) uygulama sonrası ödemli şişkinlikten şikayet edilmiştir.

Çok nadir durumlarda nefes darlığı çeken çocuk hastalarda nefes alma zorluğu şikayeti ile karşılaşılmıştır.

Aşırı hassas hastalarda tedavi sonrası bulantı görülebilmektedir.

Aşırı hassasiyetin gözlemlendiği durumlarda lakı diş fırçası ve ipi ile uzaklaştırınız.

Uygulamanın yapıldığı gün başka flor içerikli materyaller kullanmayınız.

Tedavi sonrası flor tabletlerinin kullanımına ara veriniz.

Lakin yutulmamasına dikkat ediniz.

Saklama koşulları:

4 °C - 23 °C arasında saklayınız. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri kullanmayınız. Yanıcı ortamlardan uzak tutunuz.

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılması için geliştirilmiştir. Ürünlerimiz hakkında verdiğimiz bilgiler bizce önemli bilgilerdir. Sözlü ve yazılı olarak verdiğimiz bilgiler bizim için en önemli bilgilerdir ve kullanıcıya mecburiyeti yoktur. Bizim verdiğimiz bilgiler, sizin ürünlerimizi başka uygun alanlarda kullanmanıza engel teşkil etmemektedir. Ürünlerin kullanımı bizim dışımızda kullanıcı kontrolünde olduğu için uygulamalardan tamamen kullanıcı sorumludur. Tabii ki, belirttiğimiz şartlarda, genel standartlarda kullanılması ve genel satın alma kurallarına uyulması durumunda ürünlerimizi garanti etmekteyiz.

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.com