

TR Kullanım talimatı

Ürün Tanımı:

VOCO Retraction Paste Sulcus gingivalis'in kurutulması ve genişletilmesinde kullanılan, direk aplikasyon için kapsüller halinde sunulan pasta şeklinde bir preparattır. Astrijen etkili, alüminyum klorid içerikli pat, kapsülden direk uygulanabilmektedir. Pat, hem retraksiyon ipleri veya değişik yöntemleri ile birarada hem de kendi başına kullanılabilir. **VOCO Retraction Paste** alışlagelmış tüm kapsül aplikatörleri örn. Caps Dispenser ile uygulanabilmektedir. Bir adet **VOCO Retraction Paste** kapsülün içinde üç sulkus için yeterli miktar ürün bulunmaktadır, kapsüller tek kullanımlıktır.

Endikasyonları:

- Sağlıklı diş etinde uygulanmak üzere,
- analog veya dijital ölçü alımında
- geçici veya nihai restorasyonların simantasyonundan
- sınıf II ve V dolguların yapımından önce
- marjinal gingivanın itilmesini ve sulkusun kurutulmasını sağlamak amaçlı kullanılır.

Kontraendikasyonları:

VOCO Retraction Paste sağlıklı diş etine, açık furkasyona veya açık kemiği olan hastalarda kullanılmamalıdır. **VOCO Retraction Paste** Alüminyum klorid ve Kaolin içermektedir. Materyalin içeriğinde bulunan bu maddelere karşı bilindik hassasiyeti ve alerjisi olan kişilerde kullanılmamalıdır. Aktif paradontitisi olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Hasta profiline göre uygunluk:

VOCO Retraction Paste yaş ve cinsiyet ayrımı olmadan tüm hastaların tedavisinde kullanılabilir.

Ürün performansı:

Ürünün performansı amaca uygun olup tüm ürün normlarına uygundur.

Kullanıcı:

VOCO Retraction Paste diş hekimliği alanında profesyonel eğitim almış kişiler tarafından uygulanabilir.

Uygulama:

- Materyal uygulamadan önce oda sıcaklığına getirilmelidir. Kapsül uygulamadan hemen önce alüminyum ambalajından çıkarılmalı ve uygun bir dispensere yerleştirilmelidir.
- Kapsülün ucunu gerektiği takdirde uygun pozisyona getiriniz.
- Başlangıçta kapsülden çıkan materyalin küçük bir bölümünü kanştırma kağıdına sıkınız ve atınız.
- Sulkus'u su ile temizleyiniz ve açılı olacak şekilde dikkatlice hava ile kurutunuz (hava spreyni direk sulkus' a gelecek şekilde tutmayınız).
- Patı yavaşça dairesel hareketle sulkus dolana ve fazlalık taşana kadar uygulayınız. Bunun için kapsülün ucu basınç uygulamadan sulkusun içine – en fazla marjinal epitele kadar yerleştirilebilmektedir. Diş etindeki reaksiyonu arttırmak için isteğe bağlı olarak pasta uygulanmadan önce sulkusun içine retraksiyon ipi yerleştirilebilmektedir. Retraksiyon manşetlerini veya kapakçıklarının uygulandığı durumlarda önce patı daha sonrasında uygun manşet veya kapakçığı yerleştiriniz ve hastanızı 1-2 dk. kadar ısırtınız.
- VOCO Retraction Paste**'in sulkus içinde kalma süresi 1-2 dk.' dir. Bu süre zarfında patın uygulandığı alanı kuru tutunuz. **VOCO Retraction Paste** donan bir yapıya sahip değildir.
- Akabinde en geç 2 dk. patın hasta ağızından hava su karışımı ile aspirator/ tükürük emici kullanılarak uzaklaştırılması gerekmektedir.
- Uygulamanın yapıldığı alanı yine açılı olarak kurutunuz, sulkusa direk gelecek şekilde hava tutmayınız. Gerekli görüldüğü takdirde 5. Maddeyi tekrarlayınız.
- Ölçü veya restorasyon aşamasını kullanılan ürünün kullanım kılavuzuna bağlı kalarak devam ediniz.

Dikkat edilmesi gerekenler/uyarılar:

- Korumucu gözlük ve eldiven kullanınız.
- **VOCO Retraction Paste**'i yutmayınız.
- Gözle teması durumunda bol su ile gözün yıkayınız ve gerekli görüldüğünde doktora gidiniz.
- **VOCO Retraction Paste**'in her kapsülünü sadece tek hastada kullanınız.
- Patı eşit, fazla basınç uygulamadan kullanınız.
- 2 dk.' dan fazla ağızda kalan materyal diş eti iritasyonlarına neden olabilmektedir.
- Protein koagülasyonuna bağlı olarak mukoza retraksiyon patı kullanımı esnasında geçici olarak beyazlaşabilmektedir. Bu durum geri dönüşümü olan geçici bir süredir ve kısa bir zaman sonra mukoza eski halini alır.
- **VOCO Retraction Paste** ile temas eden metal yüzeylerde ve el aletlerinde korozyon görülebilmektedir. Pat artıklarının kullanım sonrası bu yüzeylerden hemen su ile uzaklaştırılmalıdır.
- Uyarılarımız ve tavsiyelerimiz sizi ürünün kullanım amacına uygululuğunu kontrol etmektan özgür kılmamaktadır.

Saklama ve kullanım uyarıları:

4 °C ila 23 °C de saklayınız. Kullanım öncesi materyali oda sıcaklığına getiriniz. Miadi geçmiş olan ürünleri kullanmayınız.

İmha etme:

Ürünün imhasını yerel yönetmeliklere uygun şekilde yapınız.

Bildirme/bilgilendirme:

VOCO Retraction Paste e bağlı olarak gelişmiş veya gelişebileceği düşünülen durumlar gözlemlendiğinde, örn. ölüm, hastanın, uygulayanın veya üçüncü şahısların sağlık durumunun kötüleşmesi veya genel insan sağlığını tehdit eden durumlarda hemen VOCO GmbH ve yerel yetkililere bildirilmesi gerekmektedir.