



V-Print splint comfort

Indikationen / Indications

Therapeutische Schienen / Therapeutic splints
 Hilfs- und Funktionsteile die Diagnose betreffend / Auxiliary parts and functional parts for diagnostics
 Bleaching-Schienen (Home-Bleaching) / Bleaching splints (home bleaching)
 Gaumenplatten / Palatal plates

3D-Druck / 3D printing				Reinigung / Washing		Nachbelichtung / Postcuring			
Druckerhersteller / manufacturer	Gerät / Device	Schicht / Layer* [µm]	Build Style*	Gerät / Device	Programm / Program	Gerät / Device	Programm / Program		
VOCO ¹	SolFlex 170 [SMP] SolFlex 350 [SMP] SolFlex 650 [SMP] SolFlex 170 HD	100	Normal SE	Ultraschall / Ultra sonic	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²		
						Next Dent LC Box	1 × 25 min.		
						Hilite power 3D	2 × 5 min.		
				RS Wash	V-Print splint comfort	RS Cure / RS Cure US	V-Print splint comfort		
						Rührbad / stirring bath	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
								Next Dent LC Box	1 × 25 min.
Hilite power 3D	2 × 5 min.								
W2P ¹	SolFlex 170 [Plus] SolFlex 350 [Plus] SolFlex 650 [Plus] SolFlex 163 FullHD SolFlex 250 UHD	100	Normal SE	Ultraschall / Ultra sonic	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²		
						Next Dent LC Box	1 × 25 min.		
						Hilite power 3D	2 × 5 min.		
				RS Wash	V-Print splint comfort	RS Cure / RS Cure US	V-Print splint comfort		
						Rührbad / stirring bath	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
								Next Dent LC Box	1 × 25 min.
Hilite power 3D	2 × 5 min.								
ASIGA	MAX UV PRO 4K	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²		
						Next Dent LC Box	1 × 25 min.		
						Imprimo Cure	20 min. ²		
				RS Wash	V-Print splint comfort	RS Cure / RS Cure US	V-Print splint comfort		
						Rührbad / stirring bath	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
								Next Dent LC Box	1 × 25 min.
Imprimo Cure	20 min. ²								
Rapid Shape	D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²		
						Next Dent LC Box	1 × 25 min.		
						RS Cure / RS Cure US	V-Print splint comfort		
				RS Wash	V-Print splint comfort	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²		
						Rührbad / stirring bath	5 min. / 3 min.	Next Dent LC Box	1 × 25 min.
								Imprimo Cure	20 min. ²
DMG	3Delite 3Demax	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	5 min. / 3 min.			OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
						Next Dent LC Box	1 × 25 min.		
						DMG 3Dewash	V-Print splint comfort		
				RS Wash	V-Print splint comfort	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²		
						Rührbad / stirring bath	5 min. / 3 min.	Next Dent LC Box	1 × 25 min.
								3Decure	V-Print splint comfort
Shera	SHERAprint 20 SHERAprint 30 SHERAprint 40 SHERAprint 20+ SHERAprint 30+ SHERAprint 50+	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	5 min. / 3 min.			OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
						Next Dent LC Box	1 × 25 min.		
						SHERAprint-wash	V-Print splint comfort		
				RS Wash	V-Print splint comfort	SHERAprint-cure	V-Print splint comfort		
						Rührbad / stirring bath	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
								Next Dent LC Box	1 × 25 min.
Straumann	P20 II P30 II P40 II P10+ P20+ P30+ P50+	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	5 min. / 3 min.			OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
						Next Dent LC Box	1 × 25 min.		
						P wash	V-Print splint comfort		
				RS Wash	V-Print splint comfort	P cure / P cure US	V-Print splint comfort		
						Rührbad / stirring bath	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
								Next Dent LC Box	1 × 25 min.
Dentalwings	D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	5 min. / 3 min.			OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
						Next Dent LC Box	1 × 25 min.		
						D wash	V-Print splint comfort		
				RS Wash	V-Print splint comfort	D cure	V-Print splint comfort		
						Rührbad / stirring bath	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
								Next Dent LC Box	1 × 25 min.

x = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

¹ nur mit PowerVat / only with PowerVat ² Schutzgas empfohlen / N₂ recommended

3D-Druck / 3D printing				Reinigung / Washing		Nachbelichtung / Postcuring	
Druckerhersteller / manufacturer	Gerät / Device	Schicht / Layer* [µm]	Build Style*	Gerät / Device	Programm / Program	Gerät / Device	Programm / Program
MicroRay	Versus EVE Pro	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes ²
				Rührbad / stirring bath	5 min. / 3 min.	Next Dent LC Box	1 x 30 min.
Ackuretta	SOL	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes ²
						Next Dent LC Box	1 x 30 min.
						Ackuretta Curie	1 x 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on)
						Ackuretta Curie Plus	V-Print splint comfort
				CLEANI (Finishing Kit)	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes ²
						Next Dent LC Box	1 x 30 min.
						Ackuretta Curie	1 x 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on)
						Ackuretta Curie Plus	V-Print splint comfort
				Rührbad / stirring bath	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes ²
						Next Dent LC Box	1 x 30 min.
Ackuretta Curie	1 x 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on)						
Ackuretta Curie Plus	V-Print splint comfort						
Ackuretta	SOLPlus	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes
						Ackuretta Curie	1 x 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on)
						Ackuretta Curie Plus	V-Print splint comfort
				Rührbad / stirring bath	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes
						Ackuretta Curie	1 x 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on)
						Ackuretta Curie Plus	V-Print splint comfort
MiiCraft	Prime 150Y Ultra 125Y / 150Y Hyper 125Y Profession 250Y	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes ²
						Next Dent LC Box	1 x 30 min.
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes ²
						Next Dent LC Box	1 x 30 min.
Shining 3D	AccuFab-L4D	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes ²
						FabCure 2	1 x 15 min. (without heating)
				Rührbad / stirring bath	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes ²
						FabCure 2	1 x 15 min. (without heating)
UNIZ	SLASH 2 PLUS	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes ²
				Rührbad / stirring bath	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes ²
UnionTech	EvoDent S300 E128 E230	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes ²
				Rührbad / stirring bath	5 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 x 2000 flashes ²

x = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

² Schutzgas empfohlen / N₂ recommended

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.dental

VOCO

THE DENTALISTS