



V-Print splint

Indikationen / Indications

Therapeutische Schienen / Therapeutic splints

Hilfs- und Funktionsteile die Diagnose betreffend / Auxiliary parts and functional parts for diagnostics

Bleaching-Schienen (Home-Bleaching) / Bleaching splints (home bleaching)

3D-Druck / 3D printing				Reinigung / Washing		Nachbelichtung / Postcuring	
Druckerhersteller / manufacturer	Gerät / Device	Schicht / Layer* [µm]	Build Style*	Gerät / Device	Programm / Program	Gerät / Device	Programm / Program
VOCO	SolFlex 170 [SMP] SolFlex 350 [SMP] SolFlex 650 [SMP] SolFlex 170 HD	100	Normal SE	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 × 2000 flashes
				RS Wash	V-Print splint	Next Dent LC Box	1 × 30 min.
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	RS Cure / RS Cure US	V-Print splint
W2P	SolFlex 170 [Plus] SolFlex 350 [Plus] SolFlex 650 [Plus] SolFlex 163 FullHD	100	Normal SE	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 × 2000 flashes
				RS Wash	V-Print splint	Next Dent LC Box	1 × 30 min.
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	RS Cure / RS Cure US	V-Print splint
ASIGA	MAX UV PRO 4K	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 × 2000 flashes
				RS Wash	V-Print splint	Next Dent LC Box	1 × 30 min.
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	Imprimo Cure	1 × 10 min.
Rapid Shape	D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	RS Cure / RS Cure US	V-Print splint
				RS Wash	V-Print splint	OtoFlash G171	2 × 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	Next Dent LC Box	1 × 30 min.
DMG	3Delite 3Demax	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	Imprimo Cure	1 × 10 min.
				DMG 3Dewash	V-Print splint	OtoFlash G171	2 × 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	Next Dent LC Box	1 × 30 min.
Shera	SHERAprint 20 SHERAprint 30 SHERAprint 40 SHERAprint 20+ SHERAprint 30+ SHERAprint 50+	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 × 2000 flashes
				SHERAprint-wash	V-Print splint	Next Dent LC Box	1 × 30 min.
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	SHERAprint-cure	V-Print splint
Straumann	P20 II P30 II P40 II P10+ P20+ P30+ P50+	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 × 2000 flashes
				P wash	V-Print splint	Next Dent LC Box	1 × 30 min.
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	P cure / P cure US	V-Print splint
Dentalwings	D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 × 2000 flashes
				D wash	V-Print splint	Next Dent LC Box	1 × 30 min.
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	D cure	V-Print splint
Microloy	Versus EVE Pro	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 × 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	Next Dent LC Box	1 × 30 min.
						OtoFlash G171	2 × 2000 flashes
				Next Dent LC Box	1 × 30 min.		

x = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

Drucker-hersteller / manufacturer	3D-Druck / 3D printing			Reinigung / Washing		Nachbelichtung / Postcuring	
	Gerät / Device	Schicht / Layer* [µm]	Build Style*	Gerät / Device	Programm / Program	Gerät / Device	Programm / Program
Ackuretta	SOL	70	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 x 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 x 30 min.
						Ackuretta Curie	2 x 5 min. (P = 8 / D = 10 / B = on)
						Ackuretta Curie Plus	1 x 5 min. (P = 13 / D = 80 % / B = on)
				CLEANI (Finishing Kit)	3 min. / 3 min.	OtoFlash G171	2 x 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 x 30 min.
						Ackuretta Curie	2 x 5 min. (P = 8 / D = 10 / B = on)
						Ackuretta Curie Plus	1 x 5 min. (P = 13 / D = 80 % / B = on)
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 x 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 x 30 min.
						Ackuretta Curie	2 x 5 min. (P = 8 / D = 10 / B = on)
						Ackuretta Curie Plus	1 x 5 min. (P = 13 / D = 80 % / B = on)
MiiCraft	Prime 150Y Ultra 125Y / 150Y Hyper 125Y Profession 250Y	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 x 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 x 30 min.
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 x 2000 flashes
						Next Dent LC Box	1 x 30 min.
Shining 3D	AccuFab-L4D	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 x 2000 flashes
						FabCure 2	1 x 15 min. (without heating)
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 x 2000 flashes
						FabCure 2	1 x 15 min. (without heating)
UNIZ	SLASH 2 PLUS	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 x 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 x 2000 flashes

x = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.dental